

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÉ HODINKY

Obrázek 1

Stažení aplikace  
Naskenujte QR kód, následně stáhněte a nainstalujte aplikaci

Obrázek 2 – QR kód

Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci

Dobíjení baterie

Nabití zařízení přes prvním spuštěním;  
Zapojte napájecí kabel do adaptéru nebo do USB konektoru na počítači.

Obrázek 3 – nabíjení

Připojení k aplikaci

- Otevřete aplikaci a založte si profil
- Přejděte na do sekce zařízení a klikněte na Připojit zařízení
- V seznamu nalezených zařízení vyberte to své
- Dokončete připojení

MAC adresu hodinek, díky které je můžete na seznamu rozpoznat, si lze zobrazit v nastavení, sekce „informace o zařízení“.

Používání dotykové obrazovky

Ovládací centrum

Obrázek 4 (5 obrázků ciferníku)

Přetažení dolů / Přetažení nahoru  
Přetažení doleva / Přetažení doprava  
Nabídka  
Funkce  
Zprávy

Telefonní hovor

Obrázek 5

Pro uskutečňování hovorů je nutné připojit hodinky k telefonu přes bluetooth  
{\*\*Poznámka: Pro používání dalších funkcí je nutné připojit hodinky k aplikaci}.

Telefonní hovor

Upozornění pro uživatele

1. Pokud byl náramek připojen k jinému telefonu, nejprve jej odpojte jej od původního mobilního telefonu.  
Hodinky se vrátí do továrního nastavení.
2. Vezměte prosím na vědomí, že název zařízení je KM60. Zařízení nesmí být přes bluetooth připojeno k jinému zařízení s názvem KM60, jinak nebude možné přes něj telefonovat nebo přehrávat hudbu.
3. Během hovoru udržujte náramek ve vzdálenosti max. 5 metrů od telefonu, aby neklesla kvalita hovoru.

Funkce chytrých hodinek

Obrázek

## AI asistent

Klepnutím na ikonu spustíte AI asistenta v telefonu. Lze jej ovládat hlasem přes hodinky.

Obrázek

## Měření srdečního tepu

Hodinky mohou váš tep zaznamenávat v průběhu celého dne. Měření lze spustit i ručně, a to kliknutím na ikonu

Obrázek

## Pohyb

Hodinky automaticky zaznamenávají počet kroků za daný den.

POZNÁMKA: Statistika pohybu se o půlnoci vynuluje.

Funkce chytrých hodinek

Obrázek

## Tréninkový režim

Klepnutím na ikonu tréninku spustíte tréninkový režim. Lze si vybrat ze 123 sportů. Záznam o posledním tréninku se zobrazuje na hlavní stránce tréninkového režimu.

Obrázek

## Měření krevního tlaku

Měření zahájíte kliknutím na ikonu měření krevního tlaku.

Na stránce této funkce se zobrazují i výsledky předchozích měření.

Obrázek

## Měření oxysličení krve

Klepnutím na stránku SpO2 zahájíte měření saturace kyslíku v krvi. Na stránce této funkce se zobrazují i výsledky předchozích měření

Funkce chytrých hodinek

Obrázek

#### **Přehrávač hudby**

Po připojení zařízení k telefonu lze přes hodinky ovládat přehrávání hudby.

Obrázek

#### **Spánek**

Pokud budete hodinky nosit i v noci, budou zaznamenávat informace o kvalitě a délce spánku, které se zobrazí na hodinkách i v aplikaci.

POZNÁMKA: Statistika spánku se vynuluje ve 20:00

Obrázek

#### **Stopy**

Klepnutím na tlačítko start na stránce stopek spustíte měření času a klepnutím na tlačítko stop měření zastavíte.

Funkce chytrých hodinek

Obrázek

#### **Počasí**

Zobrazí informace o počasí pro aktuální a následující den. Informace o počasí se synchronizují po připojení k aplikaci. Při delší ztrátě spojení s telefonem k synchronizaci nedojde.

Obrázek

#### **Upozornění na zprávy**

Zařízení může zobrazovat upozornění z aplikací Twitteru, Facebooku, WhatsApp, Instagramu atd. Zobrazuje se posledních 5 upozornění.

Poznámka: Zobrazování upozornění lze zapnout či vypnout v aplikaci.

Obrázek

#### **Dálková spoušť fotoaparátu**

Po připojení zařízení lze dálkově ovládat fotoaparát v telefonu.

Funkce chytrých hodinek

Obrázek

#### **Tichý budík**

Nastavte budík v aplikaci. Zařízení vás na budík upozorní vibrací.

Obrázek

#### **Hladina cukru v krvi**

Klepnutím na funkci měření hladiny cukru v krvi spustíte změřte aktuální glykémii. V aplikaci je k dispozici podrobnější analýza a historie měření.

Obrázek

#### **Výzva k aktivitě**

Zařízení zavibruje, aby vás upozornilo, že jste již hodinu neaktivní a bylo by vhodné vstát a protáhnout se. Poznámka: Funkci lze zapnout či vypnout v aplikaci.

#### **Seznámení se zařízením**

##### 1. Používání ve vlhku

Vaše zařízení je voděodolné, což znamená, že je odolné proti dešti a stříkající vodě a vydrží i ten nejnáročnější trénink. POZNÁMKA: S hodinkami se nekoupejte.

Nedoporučujeme ani sprchování s hodinkami. Voda sice přístroji neublíží, nepřetržitě nošení může mít ale negativní dopad

na vaši pokožku. Kdykoli náramek namočíte, důkladně jej

před opětovným nasazením vysušte.

##### 2. Použití rychlého náhledu

Rychlý náhled vám umožňuje zkontrolovat na hodinkách čas či upozornění z telefonu, aniž byste je museli probouzet dotykem. Stačí otočit zápěstí směrem k sobě. Displej hodinek se na několik sekund rozsvítí.

#### **Obecné informace & specifikace**

##### 1. Provozní podmínky

Provozní teplota: -1–5 °C (14–122 °F) Neprovozní teplota: -20–60 °C (-4–140 °F)

##### 2. Velikost

Hodí se na zápěstí o obvodu 13–20 cm.

##### 3. Likvidace a recyklace

Upozorňujeme vás, že za

řádnou likvidaci a recyklaci chytrého náramku a příslušenství odpovídá zákazník. Chytrý náramek nevyhazuje do komunálního odpadu. Je považován za elektronický odpad, odevzdejte jej tedy na sběrném místě či vyhoďte do kontejneru určeného na elektroodpad.

Další informace vám poskytne místní úřad spravující nakládání s odpadem nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.